

Esteem™



MAGYAR

Egyrészes, méretre vágható vagy előre kivágott szto- materápiás rendszer

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS MEGJEGYZÉSEK

Vigyázat: a kipirosodott urostómás betegeknek, ha megauréterük is van és nem használnak vizeletgyűjtő zacskót, tudomásukra kell hozni, hogy bizonyos esetekben a húgyvezetékbe ragasztóanyag kerülhet. Amennyiben a húgyvezetékbe ilyen anyag nagyobb mennyiségben kerül, megfelelő orvosi ellátást kell kezdeményezni, és mérlegelni kell az öntapadó termék további használatát.

Fontos: A használat elkezdése előtt szakorvosnak kell eldöntenie, hogy konvex alaplap használatára van-e szükség.

1. A bőr előkészítése

Az eszköz alkalmazása előtt a kéznek és a sztóma körüli bőrnek tisztának, száraznak és olajos anyagoktól mentesnek kell lennie.

2. Zsák előkészítése

A) Méretre vágható zsákok (1. ábra)

Jelölje meg a sztóma alakját az alaplap védőborításán. Vágja ki az alaplapot a jelölés mentén ügyelve arra, hogy ne sértse meg a zsák film rétegét. Ne vágjon túl az utolsó vonalon. Az ujjával simítsa ki a kivágott nyílást.

B) Előre kivágott zsákok

Válasszon olyan zsákot, amelynek az előre kivágott sztómanyílása egy kicsivel nagyobb, mint a sztóma mérete.

Megjegyzés: 1) Az alaplap pereme bőrirritációt okozhat a pelenkát viselő pácienseknél. Amennyiben irritáció lép fel, vágja le a felesleges peremet az alaplapról. 2) Védje a sztómát mindenféle traumától, sérüléstől.

3. A zsák felhelyezése (2. ábra)

A levegő bejutásának elősegítéséhez válassza el egymástól a zsákrétegeket. Távolítsa el a védőborítást. Helyezze az alaplapp nyílását a sztóma közepére. Helyezze 30 másodpercig az alaplappot a sztóma körüli bőrre. Szövethatár jelenléte esetén távolítsa el a fennmaradó védőborítást. Simítsa a helyére, és szüntesse meg a redőket.

Viselje amíg kényelmes és biztonságos. A fenntartási idő változhat.

4. A zsák lezárása

A) Ürithető zsákok INVISICLOSE™ záródással (3. ábra)

Hajtsa fel a biztonsági hajtókát a fehér kivezető zárócsíknál kezdve, amíg a záró fülek nem fedik egymást. Nyomja össze a záró füleket addig, amíg nem érzi, hogy a teljes hosszuk mentén lezáródnak. Hajtsa a biztonsági hajtókát a zacskó hátulja felé és nyomja össze a záró füleket, amíg összezáródásukat nem érzi.

MEGJEGYZÉS: Az extra kis méretű ESTEEM™ zsákok nem rendelkeznek INVISICLOSE záródással.

B) Ürithető zsákok zárókapoccsal (4. ábra)

C) Ürithető gyermek zsákok zárócsíkkal (5. ábra)

Távolítsa el a védőborítást a ragasztócsíkról. Nyomja a helyére a zárócsíkot a zsák végénél, az alaplappal átellenes oldalon.

D) Urosztómás zsákok ACCUSEAL™ csappal: (6. ábra)

E) Urosztómás zsákok felhajtható csappal: (7. ábra)

5. A zsák ürítése

A) Ürithető zsákok INVISICLOSE záródással: (8. ábra)

Oldja ki a zsák zárórészét, és nyissa ki a véget. Ehhez ujjával nyomja be a kivezető zárócsíkok mindkét végét. Üritse ki a zsákot.

B) Ürithető zsákok zárókapoccsal: (9. ábra)

C) Urosztómás zsákok ACCUSEAL csappal: (10. ábra)

D) Urosztómás zsákok felhajtható csappal: (11. ábra)

Csatlakoztatás az éjszakai vizeletgyűjtő rendszerhez:

ACCUSEAL csap: (12. ábra)

Felhajtható csap: (13. ábra)

6. Szűrős zsákokkal kapcsolatos információk

Fürdéskor, úszáskor, stb. takarja le a szűrőt a mellékelt takaró lapocskákkal. A vízben eltöltött idő után távolítsa el azt.

7. A zsák eltávolítása (14. ábra)

8. Ártalmatlanítás

Kérjük, tartsa be a helyi hulladékkezelési szabályokat.

© 2009 ConvaTec Inc.

* /™ a ConvaTec védjegyeit jelöli

Forgalmazza:

Replant 4 Care Kft. 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.
www.replant.hu